




HEALTHPICC sfrutta due decadi di esperienza di Plan 1 Health
nello sviluppo degli Accessi Venosi Centrali

CARATTERISTICHE

1 Reverse Tapering

Per una procedura di impianto semplice e sicura,
riducendo il rischio di sanguinamento.

Il Reverse Tapering fornisce inoltre un'eccellente resistenza al kinking

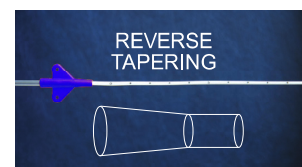

2 Set completo di introduzione

- Catetere HEALTHPICC
- Ago per microintroduzione
- MicroCLAVE® neutro
- Mandrino
- Guida a punta dritta nitinol
- Grip-Lok®
- Connettore a Y
- Dilatatore / introduttore
- Bisturi di sicurezza
- Istruzioni per l'uso
- Metro di carta

3 Compatibile con la tecnica di posizionamento della punta del catetere mediante ECG.



4 Tutte le versioni sono Power

Tutte i cateteri HEALTHPICC sono adatti all'infusione di mezzi di contrasto ad alte pressioni

Le portate massime sono indicate nella tabella seguente

Massima pressione: 300 PSI

Massima densità del fluido: 12 cp

Si raccomanda di pre-riscaldare il mezzo di contrasto a 37°.



RIF	Lume	Diametro Catetere	Materiale Catetere	Lunghezza totale	Flusso Max	Reverse tapering	Marcatura di profondità
201.60.10.13	Singolo	3 Fr	Poliuretano	450mm	2ml/s	Si	Si
201.60.10.14	Singolo	4 Fr	Poliuretano	550mm	5ml/s	Si	Si
201.60.10.15	Singolo	5 Fr	Poliuretano	550mm	7ml/s	Si	Si
201.60.10.24	Doppio	4 Fr	Poliuretano	450mm	2ml/s	Si	Si
201.60.10.25	Doppio	5 Fr	Poliuretano	500mm	5ml/s	Si	Si
201.60.10.36	Triplo	6 Fr	Poliuretano	550mm	5ml/s*	Si	Si

* Un solo lume è power

PACKAGING



Scatola: 1 unità

Unità: Un blister rigido sigillato con un foglio di Tyvek (prima Barriera sterile), esternamente una busta di carta medica (seconda barriera sterile)

INDICAZIONI D'USO

HEALTHPICC è un catetere venoso centrale ad accesso periferico per un uso a breve o lungo termine. Permette la somministrazione endovenosa di fluidi, farmaci, terapia nutrizionale e permette il prelievo di sangue. Il catetere deve essere inserito attraverso una vena del braccio. Può essere usato anche per infusioni di mezzi di contrasto ad alta pressione.

